


EXOCAD, modèle 3D Le die

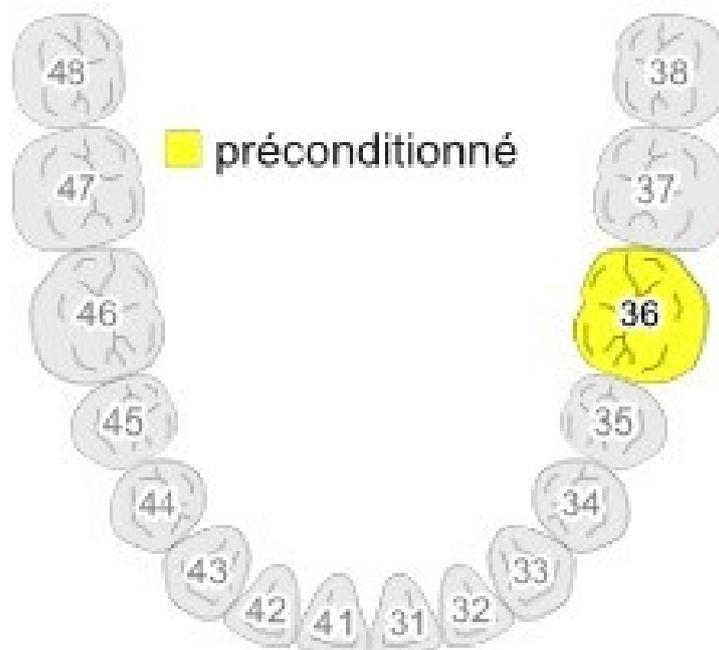

Basculer toutes les dents
simultanément

Implant

Compensation
horizontale

0,05 mm ▶

Compensation Vertical

◀ 0 mm ▶




Créer un modèle

OK

Annuler

EXOCAD, modèle 3D Implant, analogue

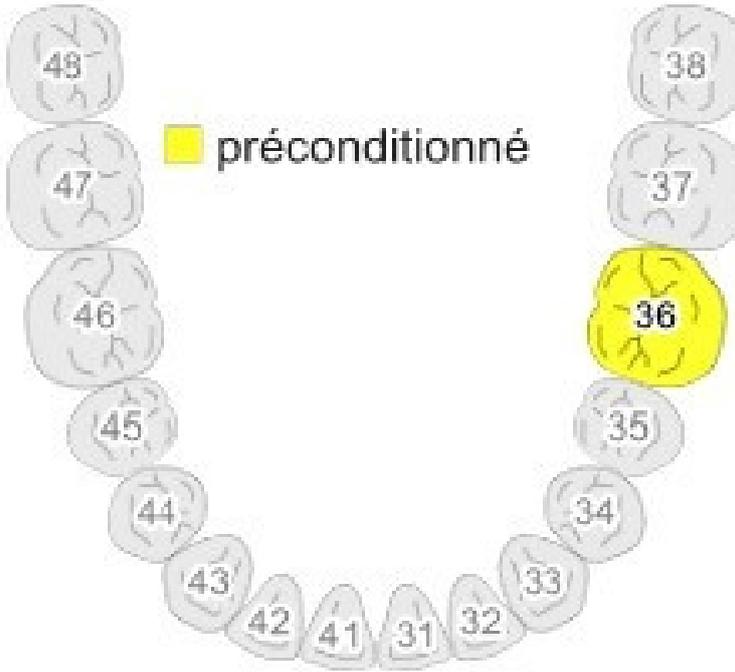

préconditionné

Basculer toutes les dents simultanément

Implant

Compensation horizontale 0,03 mm

Supports d'implant

 Créer un modèle

OK Annuler

EXOCAD, Châssis Titane

Diamètre de fraisage	1 mm
Distance à l'antagoniste	0,1 mm
Distance à l'adjacent	0 mm
Distance à la gencive	0 mm
Distance basale minimale du connecteur	0,5 mm
Épaisseur de motif de plaque	0,2 mm
Épaisseur de Plaque	0,7 mm
Épaisseur Connecteur secondaire	1,2 mm
Épaisseur Taquet Occlusal	0,6 mm
Épaisseur Bandeau Lingual	1,2 mm
Cire de Décharge	0,6 mm
Épaisseur de Selle	0,7 mm
Taille de Selle	3 mm
Épaisseur de la base	2 mm
Diamètre de fraisage de la base de la prothèse	1,2 mm
Épaisseur de la base des prothèses sous les dents	0,5 mm
Espace d'entaille antérieure	0,1 mm
Espace d'entaille postérieure	0,1 mm

Paramètres : Antérieur

Taille

Épaisseur : 1.048 mm

Largeur : 2.100 mm

Aspect fixe

Extrémités coniques

Largeur 1 : 1.400 mm

Largeur 2 :

Échanger les extrémités

Longueur de la conicité à partir de l'extrém

Longueur :


Décalage au-dessus de la surface

Crochet : 0.000 mm

Par défaut





Dimensions approximatives (hauteur × largeur en mm) en relation avec le fichier .dme de 3Shape

	3 Embase*	4 Bras*	5 Rétention*	7 Rétention roach	8 Bras roach
Crochet Akers E	1,5 × 2,0	1,3 × 2,0	1,2 × 1,5		
Crochet Nally	1,8 × 2,0	1,5 × 2,0	1,2 × 1,5		
Crochet Bonwill	1,5 × 2,0	1,3 × 2,0	1,2 × 1,5		
Crochet Akers G	1,5 × 2,0	1,3 × 2,0	1,2 × 1,5		
Crochet Backation	1,8 × 2,0	1,5 × 2,0	1,2 × 1,5		
Crochet Bonyhard		1,2 × 1,5	1,2 × 1,5	1,2 × 1,5	≥ 1,5 mm
1 Potence connexion ce crochet	2,0 × 2,5 mm				
2 Potence connexion ce Bonwill	2,0 × 2,5 mm				
6 Taquet d'appui	≥ 0,6 mm (Ne pas affiner les bords des taquets)				

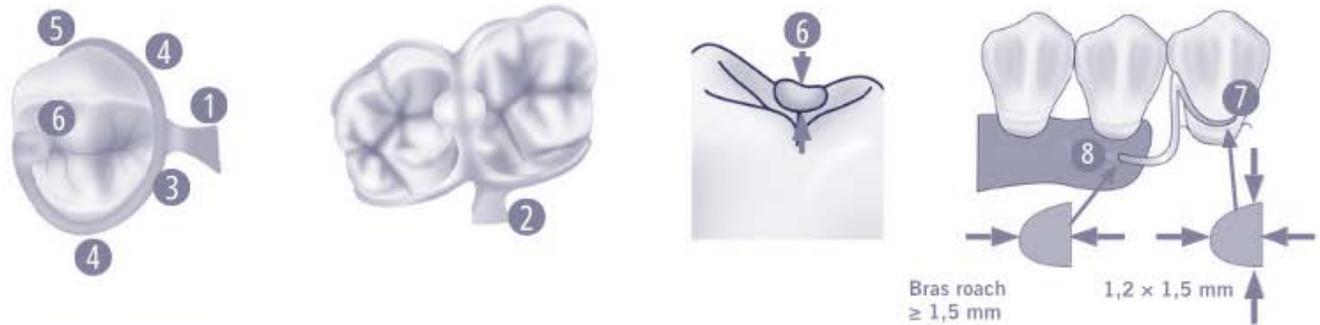

Structure des châssis

	Dimensions (hauteur × largeur)
9 Barre sublinguale	4,0 à 4,2 × 2,0 mm
10 Bandeau continu	4,2 × 2,0 mm
11 Plaque cingulaire	4,0 (hauteur) × ≥ 0,6 mm
12 Connexion plaque à potence	1,7 × 5,0 mm
13 Plaque squelettée	1,5 à 1,7 × ≥ 10,0 mm
14 Plaque entretoise classique	≥ 1,5 × 4,0 mm (Augmenter la rétention mandibulaire si nécessaire)**
15 Zone de selle de rétention	Ø 1,2 mm
1 Picot de rétention	0,8 × ≥ 0,6 mm - ne pas affiner en dessous de 0,5 mm !
6 Bandeau de finition	

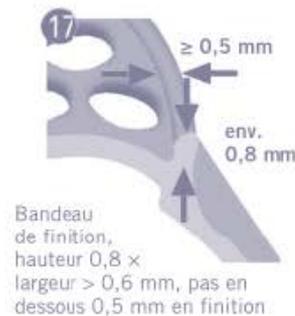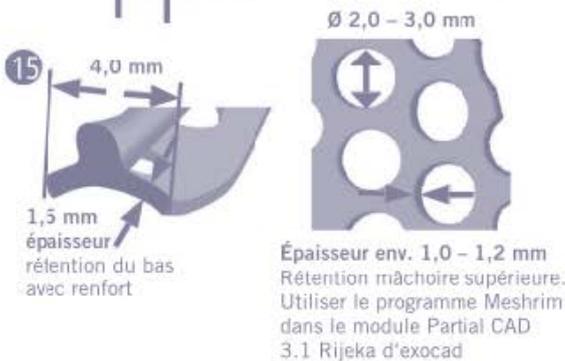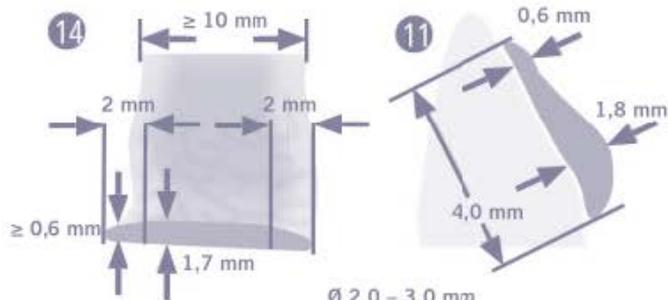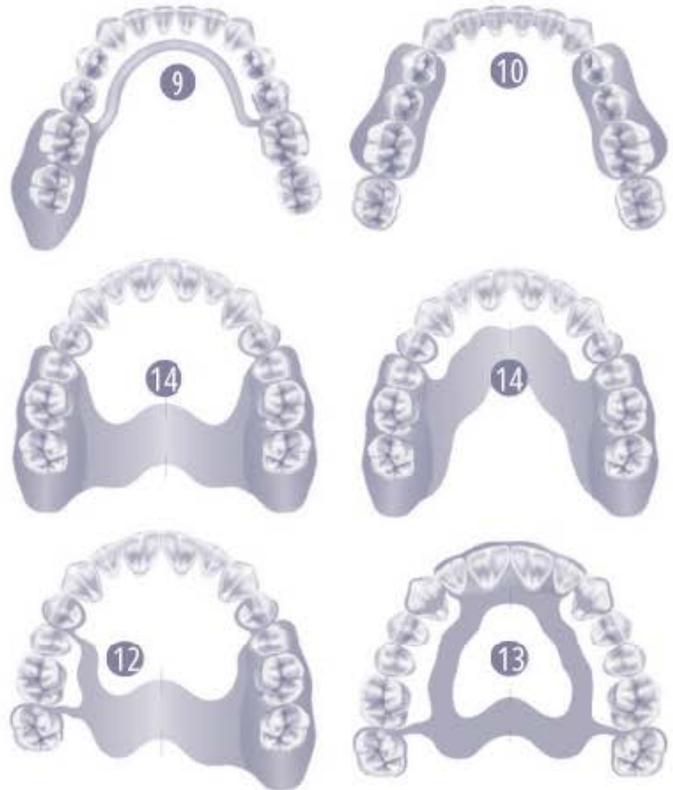

Les épaisseurs des crochets indiquées sont fournies à titre indicatif et doivent être ajustées en fonction du design spécifique.

En fonction du profil de rétention utilisé.

Les images et représentations sont présentées à titre d'exemple. Les couleurs, symboles, conceptions ainsi que les informations figurant sur les étiquettes et/ou emballages peuvent différer de la réalité.

EXOCAD, Amber mill et Cameo

